


Lyric³

Produktinformation

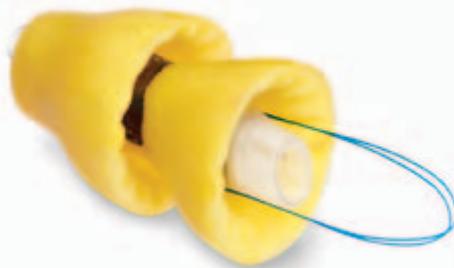

Lyric ist ein Hörgerät, das rund um die Uhr und 7 Tage die Woche über mehrere Monate* im Ohr verbleiben kann. Aufgrund der Platzierung tief im Gehörgang ist Lyric von außen zu 100% unsichtbar. Lyric ist das wohl am einfachsten zu handhabende Hörgerät am Markt. Es erfordert keinen Batteriewechsel, kein tägliches Einsetzen oder Herausnehmen und damit auch keine Wartung und Pflege.

* Die Tragedauer des Geräts ist individuell von Hörverlust und Ohrbeschaffenheit abhängig.

Ein Lyric Hörgeräteakustiker bestimmt, ob ein Kunde für Lyric geeignet ist. Dabei wird der Grad des Hörverlusts, die Größe und Form des Gehörgangs, die medizinischen Gegebenheiten sowie der Lebensstil des Kunden berücksichtigt. Lyric eignet sich für Menschen mit einem leicht- bis mittelgradigem Hörverlust (nicht geeignet für einen Hochtonsteilabfall mit > 30 dB pro Oktave).

Lyric nutzt den Vorteil der Platzierung tief im Gehörgang um eine natürliche Klangqualität zu erreichen und von der natürlichen Richtwirkung der Ohrmuschel zu profitieren.


Es verwendet eine analoge, digital programmierbare WDRC-Schaltung mit äußerst niedriger Leistungsaufnahme.

Der Lyricträger kann sein Lyric Hörgerät mithilfe des SoundLync einstellen. Der SoundLync ermöglicht es dem Hörgeräteträger, die Lautstärke einzustellen sowie das Gerät in den An-, Aus- oder Ruhe-Modus zu schalten.

Lyric ist nur zum einmaligen Einsetzen ins Ohr konzipiert. Ein Lyric Hörgerät darf nicht noch einmal verwendet werden, wenn es zuvor aus dem Ohr entfernt wurde.


Technische Beschreibung

- 1 Griff zum Einsetzen
- 2 Mikrofonschutz
- 3 Markierung „oben“
- 4 Mikrofon und Signalprozessor
- 5 Hörer
- 6 Batterie
- 7 Mediale Haube
- 8 Laterale Haube
- 9 Rückholfäden

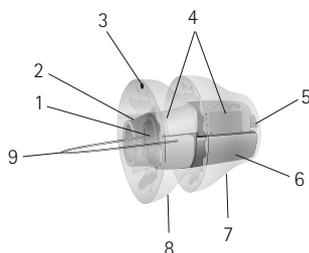


SoundLync

- 1 Schlüsselanhänger-Gehäuse
- 2 Magnet
- 3 Rückholvorrichtung
- 4 Schutzkappe

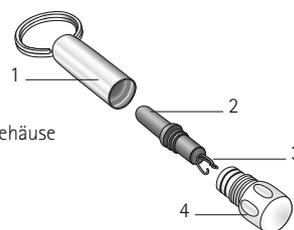

Anpassbereich

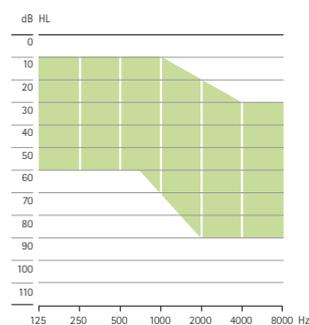

Häufige gestellte Fragen (FAQ)

Was ist neu bei Lyric3?

Lyric3 ist der Nachfolger von Lyric2. Es sieht identisch aus und hat die gleichen Abmessungen wie Lyric2. Es enthält jedoch einen neuen Signalprozessor. Daher bietet Phonak Target eine neue Vorberechnung. Ausserdem muss für die Programmierung der neue Lyric3 Programmierstift verwendet werden.

Kann bei einem laufenden Abonnement auf Lyric3 gewechselt werden?

Ja. Lyricträger profitieren immer von der neuesten Technologie.

Daher empfiehlt Phonak bei allen Kunden mit laufenden Abonnements auf Lyric3 zu wechseln.

Muss bei einem Wechsel auf Lyric3 das Ohr neu ausgemessen werden?

Nein. Lyric3 hat exakt die gleichen Abmessungen wie Lyric2. Sie können die gleiche Einsetztiefe und Gerätegrösse verwenden wie für Lyric2. Auch die Messinstrument für Lyric3 sind die gleichen wie für Lyric2.

Häufige gestellte Fragen (FAQ)

Wie wird Lyric3 programmiert?

Lyric3 wird mit dem neuen Lyric3 Programmierstift und Phonak Target programmiert. Der Programmierstift wurde komplett neu gestaltet und erleichtert den Anpassprozess mit Hilfe der Programmierstift Tasten für das linke und rechte Ohr. Dies ermöglicht jederzeit das Programmieren an beiden Ohren ohne die Schaltflächen in der Anpasssoftware benutzen zu müssen. Die Anpassparameter werden über magnetische Impulse an die Hörgeräte übertragen. Zum Programmieren muss der Programmierstift in die Nähe des Mikrofonschutzes des Hörgeräts gehalten werden. Die Kommunikation bei der Programmierung findet nur in eine Richtung statt, d. h. die Parameter für Lyric3 können programmiert aber nicht ausgelesen werden. Der Lyric3 Programmierstift ist nicht kompatibel mit Lyric2.

Für welche Personen ist Lyric3 geeignet?

Ein Lyric Hörgeräteakustiker beurteilt die Eignung für Lyric3 basierend auf vier Hauptkriterien:

1. Hörverlust innerhalb des Anpassbereichs (leicht bis mittelgradig)
2. Anamnese und gesundheitlicher Zustand
3. Geometrie des Ohres und anatomische Merkmale
4. Lebensstil (Schwimmen nur mit Schwimmschutz empfohlen, Tauchen oder Fallschirmspringen während des Tragens des Geräts nicht möglich)

Wie wird Lyric3 angepasst?

Lyric3 wird, wie Lyric2, tief im äußeren Gehörgang platziert, 4 mm vom Trommelfell und mindestens 4 mm vom Eingang des Gehörgangs entfernt. Um eine bequeme und genaue Anpassung sicherzustellen, wird jeder Hörgeräteakustiker speziell geschult und verwendet die für Lyric konzipierten Mess- und Platzierungswerkzeuge. In einem ersten Schritt wird die Länge und der Durchmesser des Gehörgangs gemessen, um die richtige Einsetztiefe und Gerätegröße bestimmen zu können. Im nächsten Schritt wird das Gerät programmiert und im Gehörgang platziert. Die Feineinstellung erfolgt drahtlos mit dem Lyric3 Programmierstift.

Ist Lyric3 wasserdicht?

Nein, Lyric3 ist wasserresistent, aber nicht wasserdicht. Schwimmen wird nicht empfohlen, ausser es werden individuell angefertigte Ohrstöpsel getragen, die Lyric vor dem Eindringen von Wasser schützen.

Welche Vorteile bietet die Platzierung tief im Gehörgang?

Durch das Platzieren tief im Gehörgang bietet Lyric folgende Vorteile: verbesserte Direktionalität und Lokalisierung, redu-

zierte Rückkopplung und Okklusion, grosser Frequenzbereich durch verbesserte Hochtonübertragung, reduzierte Windgeräusche, weniger Verzerrungen dank einer geringeren Verstärkung, problemloses Telefonieren, maximaler Komfort und dabei von außen 100% unsichtbar, einfache Anwendung ohne tägliches Einsetzen oder Herausnehmen und kein Wechseln der Batterie.

Welche Aktivitäten können mit Lyric3 nicht durchgeführt werden?

Beim Tauchen oder Fallschirmspringen darf Lyric3 nicht getragen werden. Druckschwankungen beim Tauchen oder Fallschirmspringen kann zu Unbehagen und/oder Rückkopplung führen, wenn sich Lyric3 im Gehörgang bewegt. Wenn beim Tragen von Lyric3 diese Aktivitäten dennoch versehentlich ausgeführt werden, sollte danach der Sitz des Gerätes und der Gehörgang von einem Lyric Hörgeräteakustiker überprüft werden.

Kann eine MRT-, Röntgen- oder CT-Aufnahme Lyric beschädigen oder mein Ohr gefährden?

Im Gegensatz zu einer MRT-Aufnahme wird eine Röntgen- oder CT-Aufnahme das Hörgerät nicht beschädigen oder dessen Position verändern, da hier kein Magnet verwendet wird. Allerdings sollte der Arzt und/oder Techniker über das Hörgerät informiert werden. Ist eine Röntgen- oder CT-Aufnahme des Ohres oder Kopfes erforderlich, muss das Hörgerät möglicherweise entfernt werden. Im Fall eines operativen Eingriffs, gleich welcher Art, muss der Arzt über das eingesetzte Lyric informiert werden.

Kann der Hörgeräteträger Lyric3 entfernen?

Ja, allerdings empfiehlt es sich, das Gerät von einem Lyric Hörgeräteakustiker entfernen zu lassen. Falls nötig, kann der Hörgeräteträger Lyric3 mithilfe der Rückholvorrichtung im SoundLync entfernen.

Was ist der Ruhe-Modus?

Der Ruhe-Modus entspricht einer akustisch transparenten Einstellung. In dieser Einstellung kompensiert Lyric3 die von ihm selbst erzeugte Dämpfung. Für den Lyricträger hört es sich so an als ob er kein Hörgerät tragen würde.

Wie wird die Batterie gewechselt?

Lyric ist nur zum einmaligen Einsetzen ins Ohr konzipiert. Sobald die Batterie leer ist, wird das Gerät entfernt und von einem Lyric Hörgeräteakustiker durch ein neues ersetzt.

