

# Phonak

## Fast Facts

### Roger™ Installation in Marvel Hörgeräten mit Roger iN Mikrofonen

#### Was sind Roger iN Mikrofone?

Roger iN Mikrofone sind die **drei neuen Roger-Mikrofone Roger Select iN, Roger Pen iN und Roger Table Mic II iN**. Sie wurden speziell für Marvel Hörgeräte entwickelt und machen es möglich, zwei Roger-Empfänger in einem Paar Marvel Hörgeräte zu installieren, um Signale direkt von einem Roger-Mikrofon auf die Hörgeräte zu streamen, ohne einen externen Empfänger anbringen zu müssen.

#### Wozu dienen sie?


Nach einer einfachen Installation, bieten Roger iN Mikrofone Trägern von Marvel Hörgeräten noch bessere Hörleistung bei Störgeräuschen und über Distanz. Ihre Kunden können mit dieser diskreten Lösung auch in sehr geräuschvollen Umgebungen, wie in Restaurants und bei Meetings, vollständig an Gesprächen und Aktivitäten teilnehmen.

#### Installation


Schalten Sie das Roger iN Mikrofon und das Marvel Hörgerät ein. Bringen Sie dann das Roger iN Mikrofon in die Nähe des Hörgeräts und halten Sie die Installations-Taste zwei Sekunden lang mit dem Aus- und Einbauwerkzeug für den Sicherungsstift gedrückt. Die Installation wird automatisch durchgeführt. Sobald der Empfänger installiert wurde, wird dies durch eine Reihe von Statusanzeigen bestätigt. Wenn der Empfänger für die Verwendung mit einem anderen Hörgerät wiederhergestellt werden soll, wird das gleiche Verfahren zur Deinstallation des Empfängers durchgeführt.

#### Aus- u. Einbauwerkzeug für Sicherungsstift und Installations-Taste

Roger Select iN

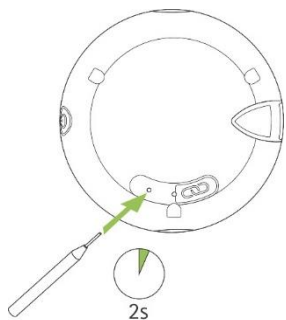

Roger Pen iN

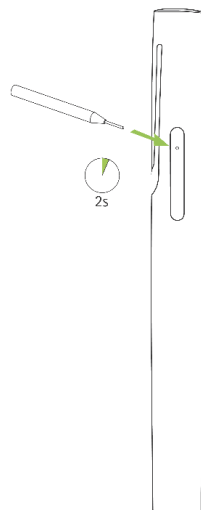

Roger Table Mic II iN

