




Données techniques

Phonak EasyCall II

Phonak EasyCall II connecte les aides auditives sans fil Phonak à un téléphone mobile. Il est attaché et connecté en permanence au téléphone et diffuse la conversation directement dans les deux aides auditives pour une qualité sonore inégalée et une compréhension de la parole optimale.

Description

- 1 Bouton d'appel avec indicateur lumineux
- 2 Port du chargeur micro-USB
- 3 Ouverture du microphone
- 4 Bague de protection anti-griffure du téléphone mobile
- 5 Ruban adhésif optionnel

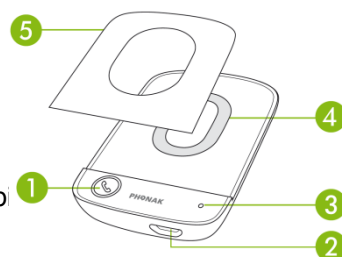

Aperçu des caractéristiques

- Prêt à l'emploi : aucun appareillage nécessaire
- Fonctionne avec tous les téléphones mobiles compatibles Bluetooth, même s'il ne s'agit pas de smartphones
- Fixé sur le téléphone mobile, il ne se perd ni ne s'oublie
- Jusqu'à 10 heures de temps de conversation
- Jusqu'à 10 jours de temps de veille












Compatibilité

- Utiliser Phonak EasyCall pour les aides auditives sans fil Spice et Quest
- Utiliser Phonak EasyCall II pour les aides auditives sans fil Venture et Belong™

Informations générales

Dimensions :	L x l x H : 69 x 45 x 12 mm
Poids :	24 g
Couleur :	Noir
Conditions de fonctionnement :	Le produit a été conçu pour un fonctionnement sans interruption ni restriction en cas d'utilisation conforme, sauf mention contraire dans le mode d'emploi. 0 °C à 40 °C et humidité relative <85 % (sans condensation)
Conditions de transport et de stockage :	-20 °C à 60 °C et humidité relative de 70 % pendant une période prolongée. Transport : <90 % (sans condensation)

Témoin lumineux

Mise en marche :	 Vert pendant 2 secondes
Mise à l'arrêt :	 Rouge pendant 2 secondes
Mode couplage Bluetooth :	 Clignotement bleu rapide
Pendant un appel :	 Bleu continu
Bluetooth connecté :	 Clignotement bleu toutes les 5 secondes pendant 1 minute
Activé et prêt à se connecter :	 Clignotement vert toutes les 5 secondes pendant 1 heure
Indication d'usure de la pile :	 13 clignotements rouges par minute  13 clignotements rouges après avoir appuyé sur le bouton hors appels  (env. 1 heure restante de conversation après la première indication d'usure de la pile)
Recharge :	 Rouge continu
Totalement rechargé avec le chargeur connecté :	 Vert continu une fois la recharge terminée Remarque : l'état de chargement n'est pas visible pendant un appel téléphonique



PHONAK

Informations sur la puissance et la batterie

Batterie :	Lithium-polymère 3,7 V Intégrée, inamovible Capacité : 320 mAh (type)
Durée de fonctionnement :	Jusqu'à 10 heures de temps de conversation Jusqu'à 10 jours de temps de veille
Informations concernant le chargement :	Tension d'entrée : stabilisée 5 Vc.c. +/- 5 % Port micro-USB Courant d'entrée : max. 300 mA Durée de chargement lorsque la pile est complètement vide : 2 h 45 min
Remarque importante :	Pour des raisons de sécurité, n'utiliser que des chargeurs fournis par Phonak ou des chargeurs stabilisés d'une tension de 5 Vc.c., min. 300 mA La pile ne peut pas être surchargée. Elle peut chauffer pendant la recharge.
Remarque :	La durée de fonctionnement et de chargement peut dépendre de la température et de l'âge de l'appareil.

Informations audio

Entrée audio :	Parole, microphone omnidirectionnel
Connexion au téléphone :	Bluetooth (parole uniquement, pas de musique). Compatible large bande (voix HD), si le téléphone/porteur le permet.

Bluetooth

Profil Bluetooth® :	Profil oreillette (HSP) Profil mains libres (HFP)
Bande passante :	2 402,0 à 2 480,0 MHz
Puissance RF :	1 mW max.
Portée de transmission au téléphone mobile :	Jusqu'à 1 m
Compatibilité Bluetooth :	Bluetooth version 3.0, Classe 3
Nombre maximum d'appareils couplés simultanément :	8

Liaison sans fil aux aides auditives

Type d'antenne :	Antenne en ferrite
Type :	Inductif (« HiBAN »)
Fréquence de fonctionnement :	10,6 MHz
Modulation :	8 DPSK
Largeur de bande occupée :	474,2 kHz
Puissance du champ :	37,04dBµV/M@3m
Plage de transmission à l'aide auditive :	Jusqu'à 25 cm

Normes

Europe :	EN 300 328 EN 300 330 EN 301 489 EN 60950-1 EN 62479
Canada :	RSS-210 Issue 8 RSS-102 Issue 4 RSS-GEN Issue 3
Japon :	ARIB-T66 (Bluetooth) EWPE (HiBAN)
États-Unis :	FCC 47 CFR section 15.209 (HiBAN) FCC 47 CFR part 15.247 (Bluetooth) FCC OET Bulletin No.65



Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Phonak est effectuée sous licence. Tous les autres noms et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations de couplage Bluetooth

Maintenez le bouton d'appel enfoncé (pendant 2 secondes) pour allumer et éteindre l'EasyCall II.



Si EasyCall II n'a jamais été couplé, il sera automatiquement en mode de couplage pendant 60 minutes dès sa mise en marche. L'indicateur lumineux clignote rapidement en bleu pour l'indiquer.

Pour activer manuellement l'Assistant d'appairage, maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote rapidement en bleu. Sur le téléphone, sélectionnez « Phonak EasyCall II » dans la liste des appareils Bluetooth et entrez le code « 0000 » à l'invite.