

1. 마이포낙 주니어 앱

- 호환 가능한 보청기: 루미티(스카이, 오데오, 나이다, 크로스), 파라다이스(오데오, 나이다, 크로스), 마블(스카이, 오데오, 나이다) *슬림, 비르토는 호환되지 않습니다.
- 스마트폰 호환성: 블루투스 4.2 및 Android OS 8.0 이상 또는 저전력 블루투스 기능 및 iOS 14.0 이상을 지원하는 스마트폰
- 기능: 볼륨 조절 및 프로그램 변경, 소음 감소, 스피치 포커스, 원격 지원, 자녀 보호 기능 등


2. 마이포낙주니어 앱과 마이포낙 앱 기능 비교

기능	앱	마이포낙주니어 앱 (myPhonak Junior App) 	마이포낙 앱 (myPhonak App) 
리모트 컨트롤	볼륨 조정	●	●
	좌/우 볼륨 개별 조정	-	●
	프로그램 변경	●	●
	음소거 활성화/비활성화	●	●
미세 조정	이퀄라이저 주파수 조절 (저음/중음/고음)	-	●
	소음 감소	●	●
	스피치 포커스	●	●
	사용자 프로그램 생성	-	●
	주변 소리 균형 유지(스트리밍시)	-	●
	이명 적응용 잡음발생기	-	●
	원격 지원	●	●
	프로필 이름 및 사진 설정	●	-
	테마 변경	●	-
	자녀 보호 기능*	●	-

* 자녀 보호 기능

: 자녀 보호 기능은 보호자가 4자리 코드를 생성하여 자녀가 특정 기능을 변경할 수 없도록 보호하는 기능입니다. 보청기를 처음 페어링할 때 혹은 [프로필]에서 설정할 수 있으며, 활성화 시에는 보청기 장치 연결 해제, 블루투스 전화 통화(대역폭 설정), Auto On 동작(충전식 보청기 자동 켜짐), 원격 지원 등의 메뉴가 잠금 설정됩니다.



[참고] 자녀 보호 기능 비활성화 방법

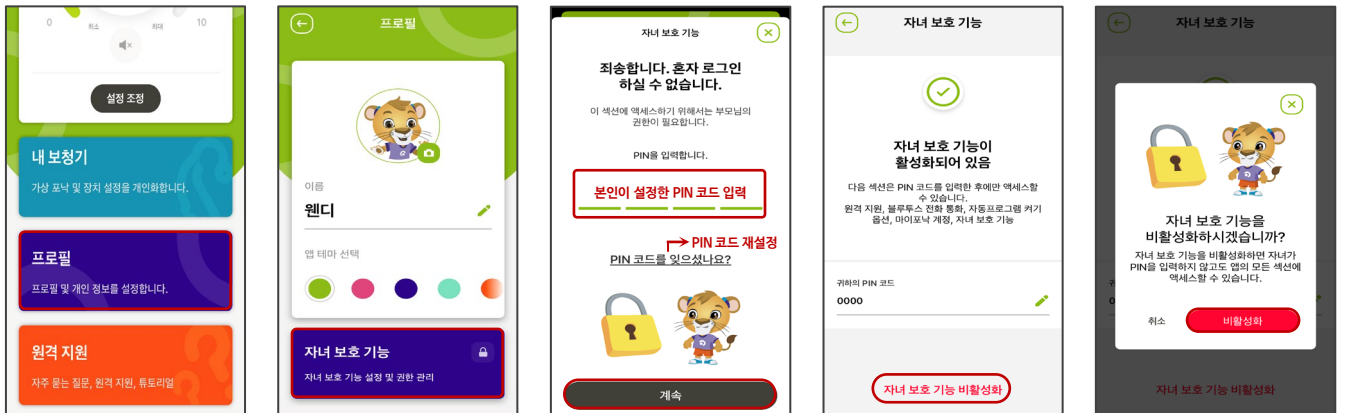

▲ [프로필] - [자녀 보호 기능] - [본인이 설정한 'PIN 코드' 입력 후 '계속'] - [자녀 보호 기능 비활성화] - [비활성화]

3. 메뉴 & 기능 안내

1) 홈

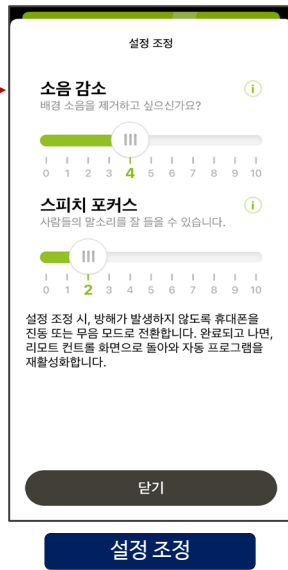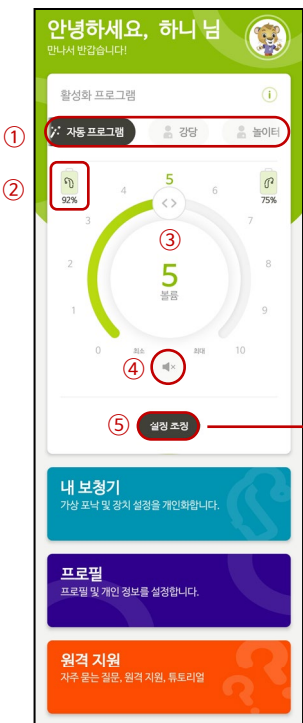

- ① 프로그램 변경: 자동 프로그램, (추가 프로그램)
* 추가 프로그램 이름은 [내 보청기] - [내 프로그램]에서 변경 가능
 - ② 배터리 잔여량: 충전식 제품만 해당
 - ③ 볼륨 조절: 0~10단계 (기본값 5를 기준으로 ± 2 dB씩 증가/감소)
 - ④ 음소거: 보청기 마이크용 음소거 및 음소거 해제
 - ⑤ 설정 조정: 소음 감소, 스피치 포커스
- * [설정 조정] 후 유지하려면 설정 조정 화면에서 나가지 않고 휴대 전화 화면만 꺼야 합니다.

[참고]

- ✓ 사용자 프로그램 생성 불가: 기본 프로그램 및 추가 프로그램 (Target에서 청각 전문가가 생성한 프로그램)만 사용 가능
- ✓ 스트리밍 시 주변 소리 균형 조절 불가

2) 내 보청기



- ① 제품 정보 보기: 제품 모델명 및 로저 수신기 설치 여부 확인
- ② 사용자 설정: 보청기 이름 변경 및 보청기/이어후크 색상 선택
- ③ 착용 시간
 - 충전식 제품: 일/월별 착용 시간 및 좌/우 착용 시간, 청취 환경 확인 가능
 - 배터리식 제품: 양이 착용 시간 확인 가능 (1일): 실시간으로만 확인 가능하며, 과거 착용 시간은 확인 불가
 - * 배터리식 제품은 좌/우 개별 착용 시간 확인 불가
 - ** 마블은 모든 제품 양이 착용 시간만 확인 가능



▲ 일/월별 착용 시간

▲ 좌/우 착용 시간



▲ 청취 환경




◀ 평균 착용 시간(1일)

- ④ 내 프로그램: 프로그램 이름 변경
- ⑤ Auto On 동작: 충전기에서 보청기 제거 시 자동 켜짐 기능 설정
- ⑥ 블루투스 전화 통화: 블루투스 대역폭 설정
- ⑦ 장치 연결 해제: 페어링 된 보청기 연결 해제



3) 프로필

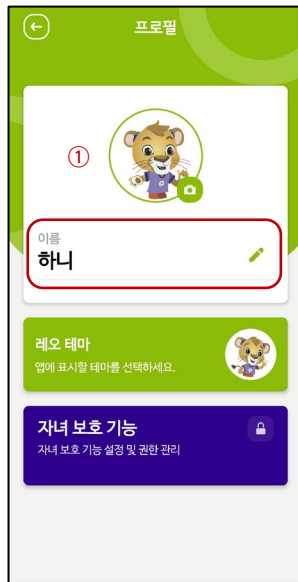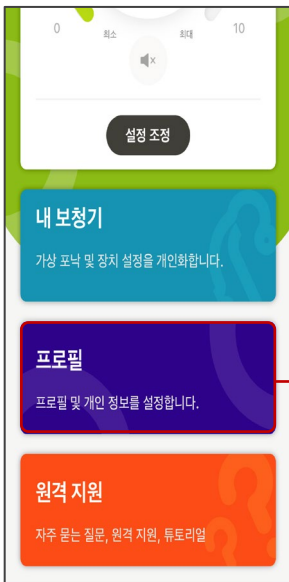

- ① 프로필 사진 설정
- ② 프로필 이름 설정
- ③ 마이포낙 주니어 앱 테마 색상 선택
- ④ 자녀 보호 기능: 잠금 표시가 되어 있는 기능을 아이가 혼자서 사용하지 못하도록 보호 (1페이지 참고)

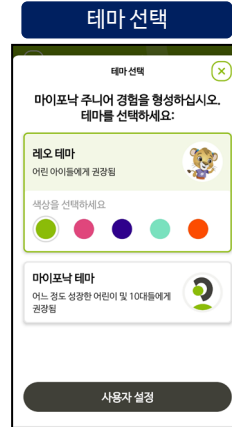

4) 원격 지원

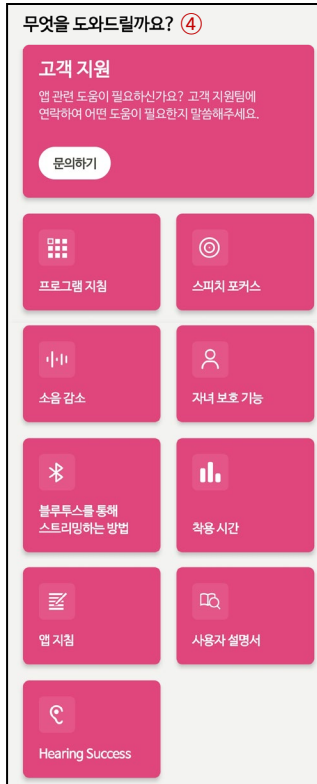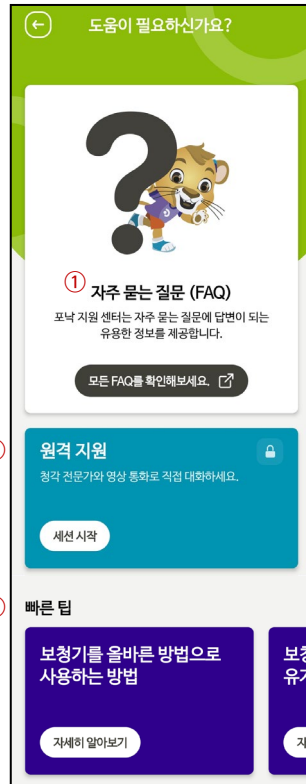

- ① 자주 묻는 질문 (FAQ)
- ② 원격 지원
- ③ 빠른 팁
- ④ 무엇을 도와드릴까요?