



## 스카이 상태표시등 비교

1. 루미티: 스카이 L-M, 스카이 L-PR, 스카이 L-SP, 스카이 L-UP  
 마 블: 스카이 M-M, 스카이 M-PR, 스카이 M-SP

보청기 상태		상태표시등	
보청기 작동 시	보청기 작동 중	초록색 1회 깜빡임 반복	
	로저 사용 중	초록색 2회 깜빡임 반복	
	배터리 저전압* (배터리식 제품)	초록색 연속적으로 깜빡임	
	배터리 저전압* (충전식 제품)	빨간색 연속적으로 깜빡임	
	볼륨 조절	볼륨 조절 시, 1회 깜빡임	
	프로그램 변경	프로그램 변경 시, 1회 깜빡임	
충전 상태 - 충전식 제품만 해당 (스카이 L-PR, 스카이 M-PR)		상태표시등	
보청기 충전 시	0 ~ 10 %	빨간색 깜빡임	
	11 ~ 80 %	주황색 깜빡임	
	81 ~ 99 %	초록색 깜빡임	
	100 %	초록색 고정	

\* 스카이 L-M, SP / 스카이 M-M, SP: 배터리가 저전압일 경우 방전되기 약 30분 전부터 배터리 경고음과 함께 상태표시등이 깜빡입니다.  
 스카이 L-PR, UP / 스카이 M-PR: 배터리가 저전압일 경우 방전되기 약 60분 전부터 배터리 경고음과 함께 상태표시등이 깜빡입니다.

2. 빌롱: 스카이 B-M, 스카이 B-PR, 스카이 B-SP, 스카이 B-UP

※ 스카이 B의 상태표시등 색상은 제품에 따라 다릅니다. ⇒ 배터리식 제품: 주황색, 충전식 제품: 초록색

보청기 상태		상태표시등	
배터리식 제품 (스카이 B-M, 스카이 B-SP, 스카이 B-UP)	보청기 작동 중	1회 깜빡임 반복	
	로저 사용 중	2회 깜빡임 반복	
	배터리 저전압*	3회 깜빡임 반복	
	볼륨 변경	볼륨 조절 시, 1회 깜빡임	
	프로그램 변경	프로그램 변경 시, 1회 깜빡임	
보청기 상태		상태표시등	
충전식 제품 (스카이 B-PR)	보청기 전원 On	1회 깜빡임	
	보청기 전원 Off	2회 깜빡임	
	보청기 작동 중	1회 깜빡임 반복	
	로저 사용 중	2회 깜빡임 반복	
	배터리 저전압*	3회 깜빡임 반복	
	볼륨 변경	볼륨 조절 시, 1회 깜빡임	
	프로그램 변경	프로그램 변경 시, 1회 깜빡임	

\* 배터리 저전압일 경우 방전되기 약 30분 전부터 배터리 경고음과 함께 상태표시등이 깜빡입니다.