

Roger Pen iN

로저 펜 iN_원페이지 (2019.12)

roger

로저 펜 iN

로저 펜 iN은 작고 스타일리쉬한 디자인으로 휴대가 간편하고, 소음 및 먼거리 등 다양한 청취상황에서 사용할 수 있는 무선 송신기입니다. 또한 TV와 같은 멀티미디어 장치와 연결이 가능합니다.

로저 펜 iN 기능

- 조용한 상황 또는 소음 상황에서 소음을 제거하고 화자의 음성에만 포커스
- 소음 상황에서 개선된 어음 명료도
- 마블 이상의 로저 다이렉트 기능이 탑재된 보청기와 직접 연결 가능(단, 로저 설치 과정 필요)
- 자동 마이크로폰 모드
- 수동 마이크로폰 모드(인터뷰 / 회의 / 목걸이 / 지동 순)
- 다화자 청취를 위한 멀티토크 네트워크(MultiTalker Network)
- 멀티미디어 장치 연결




로저 설치

로저 펜 iN은 2개의 로저 수신기를 내장하고 있어, 로저 다이렉트가 내장된 2개의 보청기에 수신기 설치가 가능합니다 (로저 설치에 대한 자세한 방법은 '로저 펜 iN 설치 가이드'를 참고하시기 바랍니다).

장치 설명

- ① 상태표시등(LED)
- ② 마이크로폰
- ③ 설치 버튼(청각전문가만 사용)
- ④ 전원 버튼 / 음소거
- ⑤ 연결 버튼
- ⑥ 마이크로폰 모드 변경
- ⑦ 충전 입력부 및 오디오 입력부(micro-USB)
- ⑧ 로저 펜 iN 슬롯
- ⑨ 충전 입력부(micro-USB)
- ⑩ 오디오 입력부(3.5 mm)

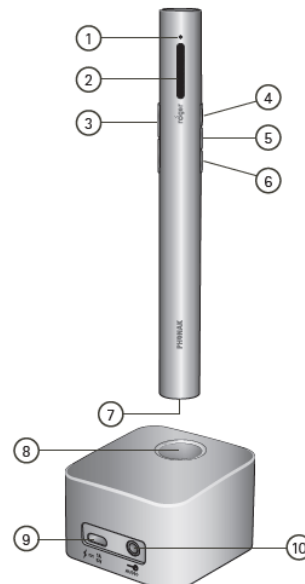

기술 데이터

일반 정보

유형:	로저 송신기
규격(길이 x 두께):	142 x 15 mm
무게:	28 g
작동 조건:	다음과 같은 온도 및 습도를 벗어나는 조건에서는 사용하지 마십시오. 0° ~ +40° C (+32° ~ +104° F) 상대 습도 < 95% (비응축 시)
운반 및 보관 조건:	장시간 기준, 섭씨 -20° ~ +60° (화씨 -4° ~ +104°) 상대 습도 < 90% 이하
배터리:	유형: 리튬 폴리머 용량: 360 mAh 전압: 3.7 V
작동 시간:	8 시간
전원 공급 장치:	입력 전압: 100-240 V 출력 전압: 5 VDC / 1 A 케이블: micro-USB 케이블 길이: 1.3 m

마이크로폰 특성

마이크로폰:	Array 마이크로폰
마이크로폰 모드:	자동 모드, 인터뷰 모드, 회의 모드, 목걸이 모드

오디오 특성

오디오 대역폭:	100 Hz - 7.3 kHz
----------	------------------

로저 특성

전송 기술:	2.4 GHz 자동 적응형 주파수 홉핑
전력 방출:	32 mW
송-수신기 작동 범위:	10 m (일반) 20 m (이상적인 조건) 로저 다이렉트 사용 시, 50 m

로저 시스템 데이터 (연결 시)

주파수(로저 송/수신기):	2.4 GHz
페어링 작동 범위:	10 cm

로저 네트워크

호환 가능한 로저 수신기:	모든 로저 수신기
호환 가능한 로저 수신기의 개수:	제한 없음
호환 가능한 로저 송신기:	로저 온 iN, 로저 온, 로저 펜 iN, 로저 펜, 로저 셀렉트 iN, 로저 셀렉트, 로저 클립-온 마이크
페어링 작동 범위:	10 cm

액세서리

도킹 스테이션:	충전 입력부 (micro-USB) 오디오 입력부 (3.5 mm)
목걸이(끈) 길이:	56 cm

Roger

로저 펜 iN 설치 가이드



목차


로저 다이렉트가 내장된 한 쌍의 보청기와 페어링 방법.....	1
로저 펜 iN에 연결된 로저 수신기 개수 확인.....	2
보청기에서 로저 수신기 제거.....	3

로저 다이렉트가 내장된 한 쌍의 보청기와 페어링 방법

Phonak Target 6.1 이상 버전의 피팅소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하십시오.

설치 단계:

1. 로저 펜 iN의 전원을 켭니다.
2. 상태표시등이 초록색으로 깜박이기 시작할 때까지 **설치 버튼**을 핀툴로 2초간 길게 누릅니다.

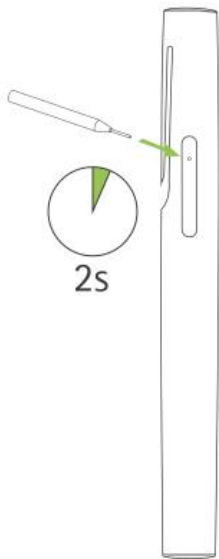

로저 펜 iN

3. 수신기를 설치할 한 개의 보청기 전원을 켜고, 로저 펜 iN에 가까이 둡니다(10cm 이내).
4. 로저 펜 iN의 상태표시등이 초록색으로 고정될 때까지 약 5초간 기다립니다.
5. 양측 보청기 착용 시, 설치가 완료된 보청기의 전원을 반드시 끈 후 두 번째 보청기에 대해 2~5단계를 반복합니다.


참고: 설치가 완료된 후 보청기는 로저 펜 iN과 자동으로 페어링됩니다.

설치 후 상태표시등이 빨간색으로 변했다면 설치가 완료되지 않은 것입니다. 아래와 같은 원인인지 확인합니다.

- 보청기에 이미 로저 수신기가 설치되어 있습니다.
- 로저 펜 iN과 보청기가 너무 멀리 떨어져 있습니다.
- 로저 펜 iN에 설치 가능한 로저 수신기가 없습니다.
- 해당 보청기에는 로저 다이렉트 기능이 없습니다.

로저 펜 iN의 로저 수신기 개수 확인

로저 펜 iN을 켜 후 설치 버튼을 핀툴로 짧게 누릅니다.

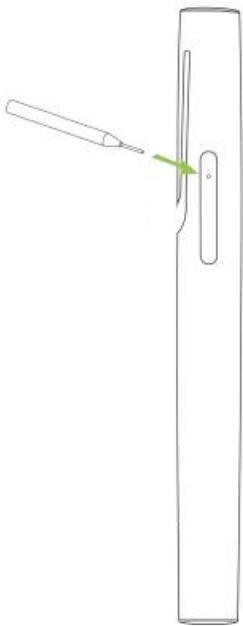

로저 펜 iN


상태표시등 색상을 통해 설치 가능한 로저 수신기 개수를 확인할 수 있습니다.

- ● 두 개의 로저 수신기 설치 가능
- ● 한 개의 로저 수신기 설치 가능
- ● 설치 가능한 로저 수신기 없음

보청기에서 로저 수신기 제거

제거 단계:

1. 로저 펜 iN의 전원을 켭니다.
2. 상태표시등이 초록색으로 깜박이기 시작할 때까지 **설치 버튼**을 핀툴로 2초간 길게 누릅니다.

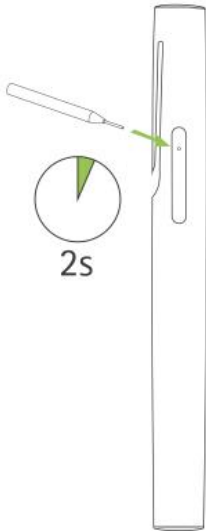

로저 펜 iN

3. 수신기를 제거할 한 개의 보청기 전원을 켜고, 로저 펜 iN에 가까이 둡니다(10cm 이내).
4. 로저 펜 iN의 상태표시등이 초록색으로 고정될 때까지 약 5초간 기다립니다.
5. 양측 보청기 착용 시, 제거가 완료된 보청기의 전원을 반드시 끈 후 두 번째 보청기에 대해 2~5단계를 반복합니다.

제거 절차 후 표시등이 빨간색으로 변하면 제거가 완료되지 않은 것입니다. 아래와 같은 이유가 있습니다.

- 보청기에 로저가 설치되어 있지 않습니다.
- 로저 펜 iN과 보청기가 너무 멀리 떨어져 있습니다.
- 로저 펜 iN에 이미 두 개의 로저 수신기가 있습니다.
- 해당 보청기에는 로저 다이렉트 기능이 없습니다.